

お客様各位

オリンパス株式会社

ディスポーザブル高周波ナイフ KD-625 【HookKnife J】

製品改良に関するご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびご使用いただいておりますディスポーザブル高周波ナイフ KD-625 【HookKnife J】の製品改良を行いましたのでご案内申し上げます。

敬具

記


1、対象製品

品名	販売名
KD-625LR	ディスポーザブル高周波ナイフ KD-625
KD-625QR	ディスポーザブル高周波ナイフ KD-625

2、変更内容

切開ナイフを収納した状態で、挿入部を操作部側から複数回巻くと、切開ナイフのフック部が曲がり突出できなくなる、「ナイフ引き込まれ現象」が確認されておりました。

そのため、ナイフ引き込み現象の対策として、下図のように、先端カバーの送液口の形状を円形から十字形に変更いたします。

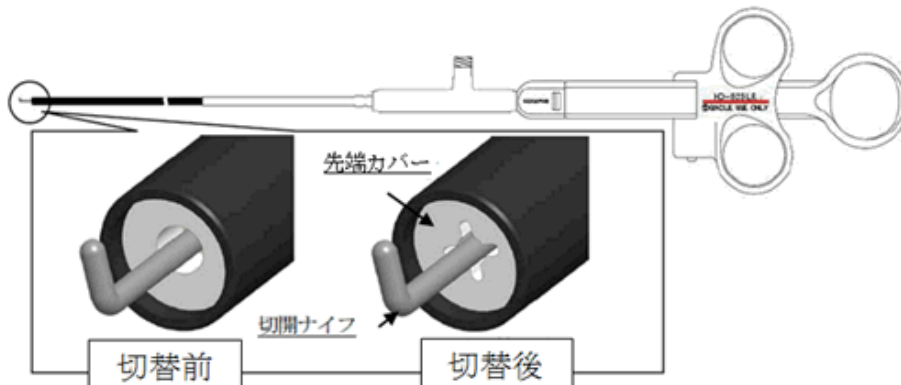

なお、この仕様変更による、臨床使用における影響はございません。

3、切替ロット

ロット No:76K 以降 順次切替予定

・KD-625LR 2017年8月上旬頃

・KD-625QR 2017年9月上旬頃

その他、製品仕様につきましては、オリンパス内視鏡お客様相談センター、支店・営業所までお問い合わせ下さい。

以上