

「サラヤ針捨てBOX 1.5L」仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、下記のとおり仕様変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。
 なお、価格等の変更はございません。
 引き続き本品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【発売日】

2018年8月21日




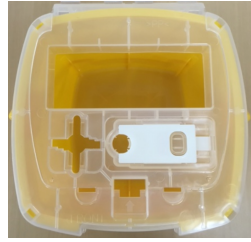
※現行品は9月下旬を目途に、在庫が無くなり次第終売となります。

【変更内容】

①コード類の変更

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
商品コード	45313	45335
統一商品コード	696453135	696453357
JANコード	49-87696-45313-5	49-87696-45335-7
ITFコード	1-49-87696-45313-2	1-49-87696-45335-4

②商品仕様の変更

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
外観	 外観  上部	 外観  上部
単品サイズ(mm)	W: 150 × D: 151 × H: 137	W: 150 × D: 151 × H: 137
単品重量	200g	210g
外装サイズ(mm)	W: 460 × D: 420 × H: 400	W: 460 × D: 480 × H: 400
外装重量	6.6kg	7.6kg
1 梱入数	30	30

③商品機能の変更

◆ペン型注入器用針の取り外し機構の追加

スライダーを用いてペン型注入器用針の取り外しができるようになりました。

2016年12月5日に販売開始されました、ペンニードル®プラス（販売業者：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社）の取り外しにも対応可能です。

また、スライダー部の近辺に「ペン型注入器用」ならびに回転矢印（ペン型注入器を回転させる向き）を刻印することで、ユーザビリティを向上させました。

◆投入口の拡大、配置変更

ペン型注入器用針対応スライダーの追加に伴い、投入口の配置を奥へ変更いたしました。

また、投入口を拡大することで小容量のシリンジや翼状針の廃棄にも対応可能で、投入口の内面に設けている仕切板の溝を1cmから2cmにすることで、廃棄物流出リスクを軽減させました。

◆取扱説明書の同梱（外装箱に）

本体の組み立て方法ならびにペン型注入器用針対応スライダーの使い方の取扱説明書を外装箱に同梱いたします。

以上