

平成 30 年 8 月

お客様各位



泉工医科工業株式会社

東京都文京区湯島 2-30-7

商品企画本部 循環器部

TEL.03-3812-3254

FAX.03-3812-3675

## NSH へパリン化カニューレ 経皮的挿入用カニューレ

### 一部仕様変更のお知らせ（第 1 報）

拝啓 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製造の NSH へパリン化カニューレ 経皮的挿入用カニューレ（PCKC シリーズ）につきまして、カニューレ本体に装着されているコネクタキャップとダイレーターを下記のとおり仕様変更致します。

本件に関しまして、ご不明な点がございましたら、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。今後ともご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

#### 記

#### 1. 変更対象製品

経皮的挿入用カニューレ（PCKC シリーズ）の以下の品番

- ・春日部物流センター在庫品：PCKC-A-14, PCKC-A-16, PCKC-A-18, PCKC-A-20  
PCKC-V-18, PCKC-V-20, PCKC-V-22, PCKC-V-24
- ・特注、受注生産品：PCKC-A-14P, PCKC-A-16P, PCKC-A-18P, PCKC-A-20P

※上記品番以外の経皮的挿入用カニューレ（例：PCKC-A-14S など）は、変更対象外となります。

※この変更による、商品コード、JAN コード、型式（品番）の変更はございません。

#### 2. 仕様変更内容

カニューレ本体に装着されているコネクタキャップとダイレーターにつきまして、以下の写真の通り変更となります。具体的には、コネクタキャップとダイレーターがロックできる機構となります。

この変更に伴い、カニューレ挿入後、ダイレーターをカニューレ本体から引き抜く際の方法に若干変更がございます。詳細は添付資料をご参照頂きますよう宜しくお願い申し上げます。


送血用（現行品）




送血用（変更品）



脱血用（現行品）

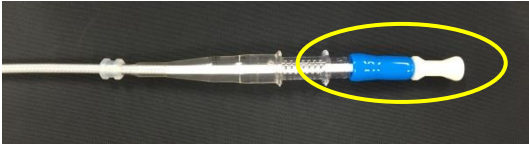

脱血用（変更品）

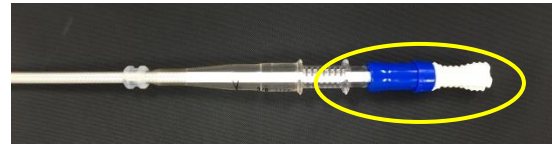

コネクタキャップ付近拡大写真（ダイレーターを少し引き抜いた状態で撮影）



※写真は送血用です。脱血用も同様に変更となります。

※カニューレ本体チューブ、挿入セット（付属品）に変更点はありません。

### 3. 変更理由

カニューレ挿入時、ダイレーターが先端側から押し戻され、カニューレ先端とダイレーターとの間に段差が生じることによる挿入不良の事例がございました。その対応策として、ダイレーターが挿入時にずれないように、コネクタキャップとダイレーターをロックできる機構に改良致しました。

### 4. 変更予定時期

現時点では、10月中旬以降より順次変更品が出荷される見込みです。各品番の在庫状況により、時期が前後する可能性があります。詳細は、9月中旬以降発行予定の第2報にてお知らせします。

以上